

MeteoGlass Android alkalmazás

Az alkalmazás működéséhez Android 4.1-es vagy újabb rendszert futtató telefon vagy táblagép szükséges.

Az alkalmazás telepítése

- Az Android Beállítások/Biztonság/Ismeretlen források menüpontban engedélyezze az ismeretlen források telepítését.
- töltse le a meteoglass.apk-t
- A letöltött apk-ra koppintva indítsa el a telepítőt.

MeteoGlass párosítása a telefontal/táblagéppel

- Kapcsolja be a telefon bluetooth modulját az Android Beállítások/Bluetooth menüpontban, majd ugyanitt indítson keresést.
- Amennyiben a MeteoGlass repülőgépes üzemmódban van (ki van kapcsolva a Bluetooth modul), azt előtte vissza kell kapcsolni normál üzemmódba. Lásd lentebb.
- A MeteoGlass kikapcsolt állapotában, amikor nem világít a power LED nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP gombot, majd eközben 4 másodpercen belül nyomja meg a PLAY gombot. Ekkor a MeteoGlass párosítható üzemmódba kerül. Ezt az 5 kék LED felváltott villogása jelzi. Ez az üzemmód 1 perc múlva automatikusan kikapcsol.
- A telefonon az elérhető eszközök listáján válassza ki a MeteoGlass-t.

Repülőgépes üzemmód

Autonóm működés közben lehetőség van úgynevezett „repülőgépes” üzemmód beállítására, vagyis a beépített bluetooth rádió adó-vevőjének kikapcsolására.

A készüléket repülőgépes üzemmódban szállítjuk.

Repülőgépes üzemmód ki/be kapcsolása

A készülék kikapcsolt állapotában a STOP gombot hosszan nyomva először a power LED zöld színnel villogni kezd, majd vagy folyamatos pirosra vagy folyamatos zöldre vált.


A folyamatos piros jelzi a Bluetooth modul kikapcsolt állapotát, a folyamatos zöld pedig a Bluetooth modul bekapcsolását.

Az alkalmazás használata

A telepítés után az alkalmazás a MeteoGlass ikonra kattintva indítható.


Kapcsolat felvétel a MeteoGlass-szal

Az alkalmazás automatikusan kapcsolódik az első párosított szemüveghez. Ezt a jobb felső ikon sorban található fehér Bluetooth ikon jelzi. A kapcsolat elvesztése esetén ez az ikon pirosra vált. Ilyen esetben ellenőrizze, hogy a telefon/táblagép Bluetooth modulja be van-e kapcsolva, illetve kerüljön közelebb a MeteoGlasshoz. A Bluetooth ikonra kattintva kezdeményezheti a kapcsolat felvételét/helyreállítását.

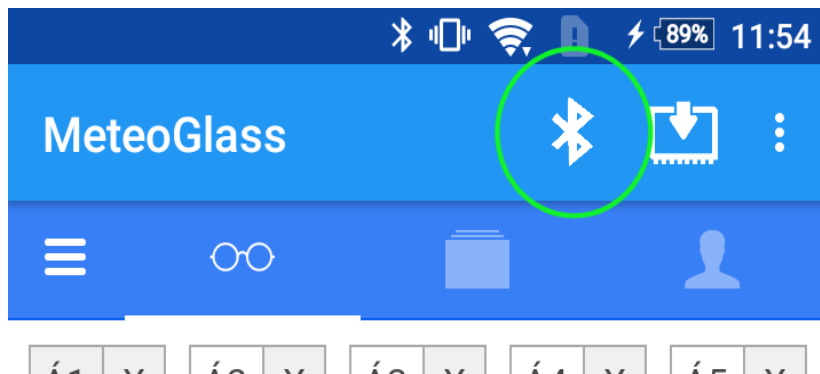


A főképernyő felső részén található ikonokkal navigálhat az elérhető színprogramok, szöveges tartalmak és felhasználói menüpontok között.

Az alsó MeteoGlass vezérlő sorban elindíthatja vagy leállíthatja az aktuális színprogramot.

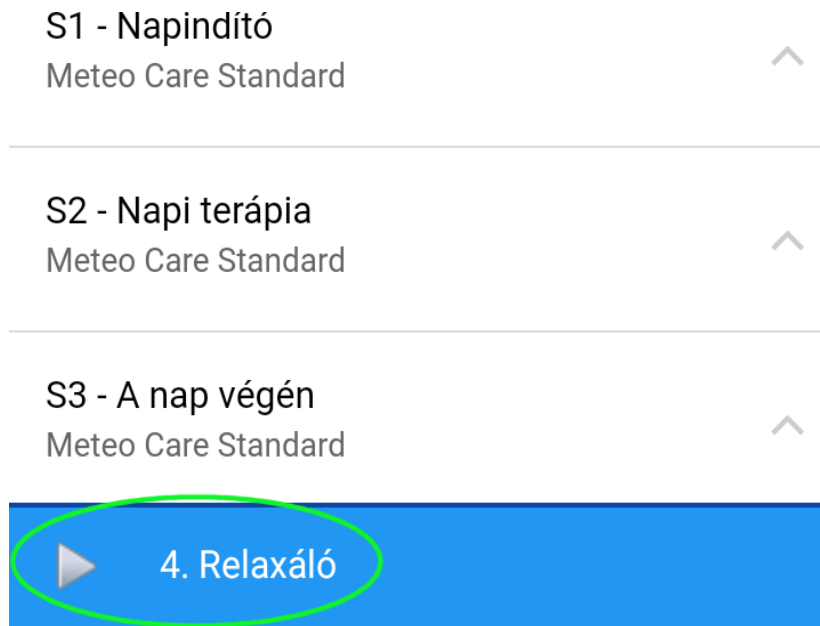

A vezérlő sor felhúzásával elérhetővé válik a teljes vezérlő felület, ahol elindíthatja a MeteoGlass öt programhelyén lévő színprogramokat, beállíthatja a hangerőt, hangszínt és a fényerőt.

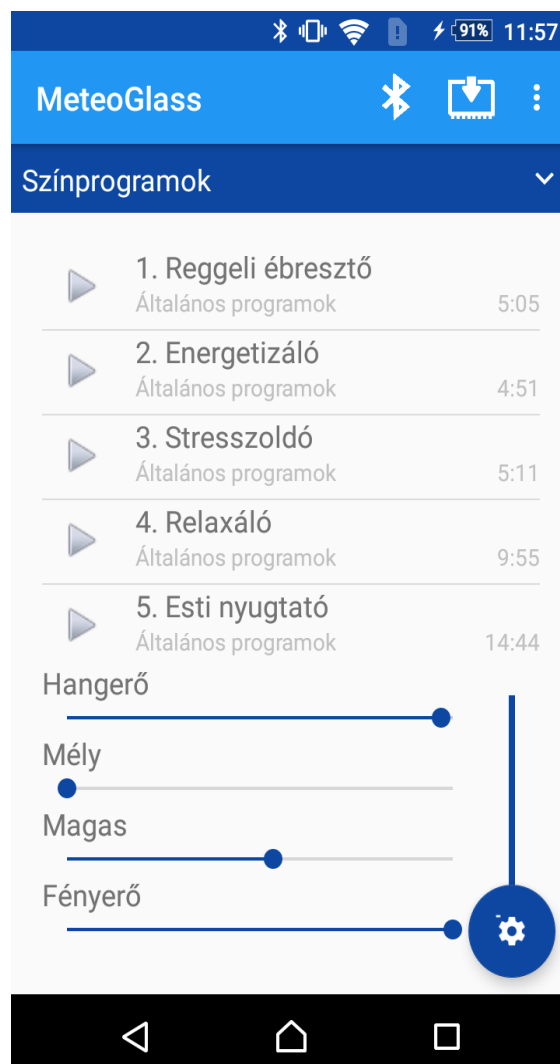

Regisztráció, bejelentkezés

A MeteoCare szolgáltatások használatához (terápiás programok letöltéséhez, humánmeteorológiai tartalmak eléréséhez stb.) internet kapcsolat illetve bejelentkezés szükséges. Ehhez a www.meteoklinika.hu oldalon regisztrált adatait kell megadnia. Amennyiben még nem regisztrált, úgy a Regisztráció gombra kattintva ezt megteheti.

A MeteoGlass vezérlő funkciók (lejátszás, leállítás, hangerő-, hangszín-, fényerő beállítás) internet kapcsolat illetve regisztráció nélkül is használhatók.


Terápiás programok letöltése

A felső ikon sáv Színprogramok ikonjára kattintva megjelenő oldal felső részén a szemüveg 5 tárhelyének megfelelő öt dobozban választhatja ki a letöltendő színprogramokat.

Az 5 hely egyikére koppintva az adott hely kijelölődik. A kijelölt tárhelyre az alsó részben látható listáról választhat színprogramot. A lista egy elemére kattintva a színprogram a kijelölt tárhelyre kerül. A listát lefelé túlhúzva majd elengedve lehet frissíteni.

Amennyiben a listán nem jelennek meg színprogramok, akkor a listát lefelé húzva majd elengedve annak tartalma frissíthető.


Az összeállított programokat a Letöltés a szemüvegre gombbal lehet áttölteni a szemüvegre. (Ez a programoktól függően akár több percet is igénybe vehet. A letöltés állapotáról az alsó folyamatjelző ad tájékoztatást.)

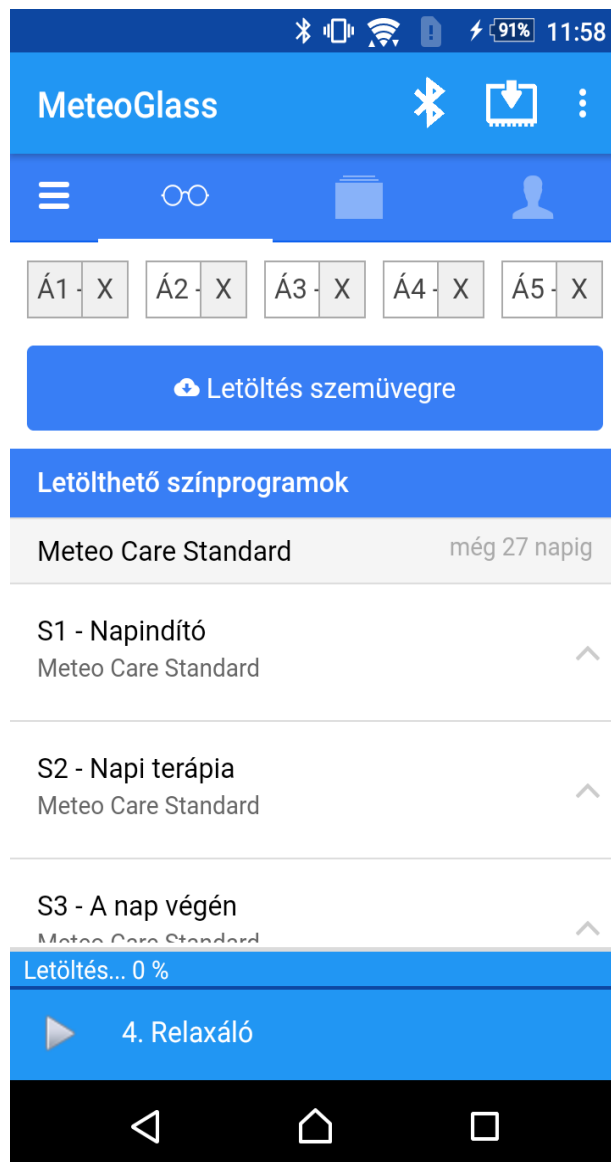

Szöveges tartalmak

A felső ikon sáv Tartalmak ikonjára kattintva megjelenő oldalon az aktuális humánmeteorológiai előrejelzések illetve egyéb szöveges tartalmak listája jelenik meg. A lista elemekre kattintva megnyitható a megfelelő tartalom.

A MeteoGlass egyszerre csak egy Androidos készülékkel tart Bluetooth kapcsolatot. Ha másik készülékkel is szeretné használni, akkor az előbbi készülék jobb felső ikon sor ... ikonjára kattintva megjelenő menü Szemüveg kapcsolat bontása menüpontra kattintva megszüntetheti a kapcsolatot. A kapcsolat bontását az áthúzott és piros Bluetooth ikon jelzi. Erre kattintva a kapcsolat újra felvehető.

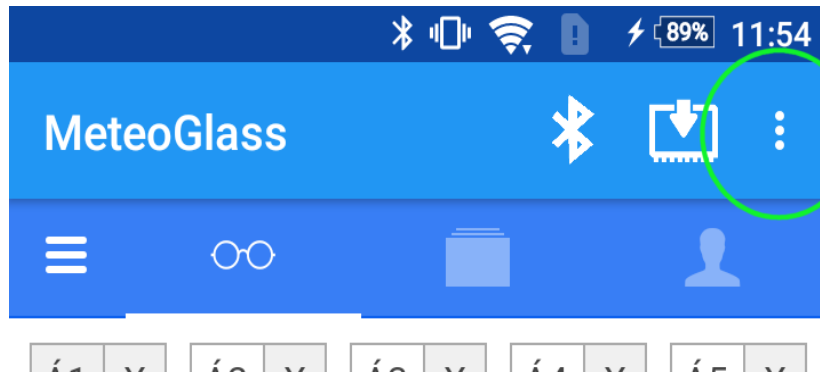

MeteoGlass firmware frissítés

A felső ikonsor Firmware frissítés ikonjával megnyíló ablakban kereshet frissítést a MeteoGlasson futó firmwarere.

A frissítéshez be kell jelentkeznie!

A firmware frissítés megkezdése előtt mindig helyezze a MeteoGlasst az Androidos készüléke közelébe, a megfelelő Bluetooth kapcsolat biztosítása érdekében!