

# MeteoGlass Windows alkalmazás

Az alkalmazás működéséhez Windows 7 vagy újabb operációs rendszert futtató számítógép szükséges.

## Az alkalmazás telepítése

- töltsse le a telepítőt
- Indítsa el a telepítőt, válassza ki a telepítő nyelvét majd kattintson a Telepítés gombra. Ekkor a telepítő installálja a szükséges USB drivert, a MeteoGlass kezelő programot, és szükség esetén elindítja a Microsoft .NET-keretrendszer 4-es verziójának telepítését.

## Az alkalmazás használata

A telepítés után az alkalmazás a Start menüből az ICI/MeteoGlass mappából indítható.


### MeteoGlass csatlakoztatása a számítógéphez

A MeteoGlass USB-n csatlakoztatható a számítógéphez. Az alkalmazás automatikusan érzékeli a csatlakoztatott szemüveget. Ezt a jobb alsó sarokban megjelenő „USB kapcsolat OK” felirat illetve a bal oldali MeteoGlass vezérlő sáv megjelenése jelzi.

A főképernyő felső részén található ikonokkal navigálhat az elérhető színprogramok, szöveges tartalmak és felhasználói menüpontok között.



Az bal oldali MeteoGlass vezérlő sávban elindíthatja a MeteoGlass öt programhelyén lévő színprogramokat, beállíthatja a hangerőt, hangszínt és a fényerőt.

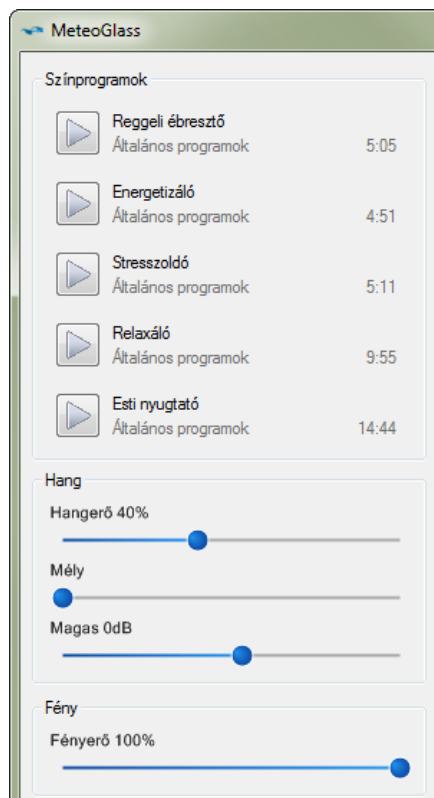

## Regisztráció, bejelentkezés

A MeteoCare szolgáltatások használatához (terápiás programok letöltéséhez, humánmeteorológiai tartalmak eléréséhez stb.) internet kapcsolat illetve bejelentkezés szükséges. Ehhez a [www.meteoklinika.hu](http://www.meteoklinika.hu) oldalon regisztrált adatait kell megadnia. Amennyiben még nem regisztrált, úgy a Regisztráció gombra kattintva ezt megteheti.

A MeteoGlass vezérlő funkciók (lejátszás, leállítás, hangerő-, hangszín-, fényerő beállítás) internet kapcsolat illetve regisztráció nélkül is használhatók.

## Terápiás programok letöltése

A felső ikon sáv Színprogramok ikonjára kattintva megjelenő oldal felső részén a szemüveg öt tárhelyének megfelelő öt dobozban választhatja ki a letöltendő színprogramokat.

Az 5 hely egyikére kattintva az adott hely kijelölődik. A kijelölt tárhelyre az alsó részben látható listáról választhat színprogramot. A lista egy elemére kattintva a színprogram a kijelölt tárhelyre kerül. A listát lefelé húzva majd elengedve lehet frissíteni, illetve az egérrel fogd és vidd módszerrel lehet görgetni. (A hagyományos jobb oldali görgetősáv nem jelenik meg.)

*Amennyiben a listán nem jelennek meg színprogramok, akkor a listát lefelé húzva majd elengedve annak tartalma frissíthető.*

Az összeállított programokat a Letöltés a szemüvegre gombbal lehet áttölteni a szemüvegre. (Ez a programoktól függően akár több percet is igénybe vehet. A letöltés állapotáról az alsó folyamatjelző ad tájékoztatást.)

The screenshot displays the MeteoGlass application interface. On the left, there is a sidebar with a list of color programs (Színprogramok) and audio/visual settings. The main area shows a selection of programs for download to the glasses.

**Színprogramok listája:**

Program	Állomás	Hossz
Reggeli ébresztő	Általános programok	5:05
Energetizáló	Általános programok	4:51
Stresszoldó	Általános programok	5:11
Relaxáló	Általános programok	9:55
Esti nyugtató	Általános programok	14:44

**Hang beállítások:**

- Hangerő: 40%
- Mély: [slidert]
- Magas OdB: [slidert]

**Fény beállítások:**

- Fényerő: 100%


**Letölthető színprogramok:**

- Meteo Care Standard (még 6 napig)
- S1 - Napindító (Meteo Care Standard)
- S2 - Napi terápia (Meteo Care Standard)
- S3 - A nap végén (Meteo Care Standard)
- Általános programok
  - Á1 - Reggeli ébresztő (Általános programok)
  - Á2 - Energetizáló (Általános programok)

Az alján a "Letöltés kész" státusz és a "USB kapcsolat OK. Feltöltve..." üzenet látható.

## Szöveges tartalmak

A felső ikon sáv Tartalmak ikonjára kattintva megjelenő oldalon az aktuális humánmeteorológiai előrejelzések illetve egyéb szöveges tartalmak listája jelenik meg. A lista elemekre kattintva megnyitható a megfelelő tartalom.

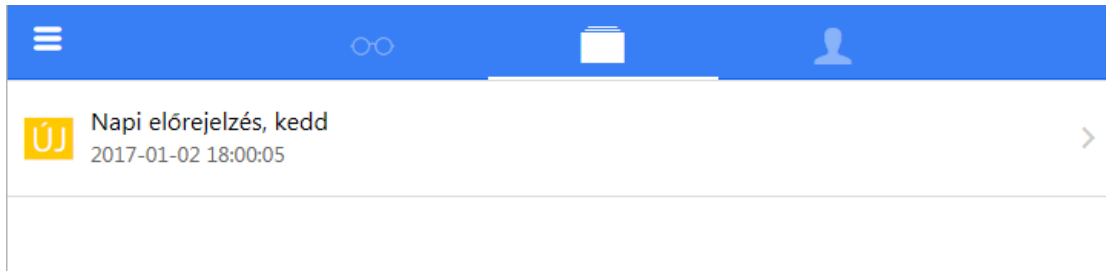

## MeteoGlass firmware frissítés

A jobb alsó sarokban lévő USB kapcsolat OK feliratra kattintva megnyíló ablakban kereshet frissítést a MeteoGlasson futó firmwarere. Ha létezik új verzió, akkor a Firmware frissítés gombbal indítható a frissítés.

A frissítéshez be kell jelentkeznie!

